

AZIONE PALPEBRALE OCCHI ROSSI E IRRITATI

INDICAZIONI

Iridina® Spray è un dispositivo medico in spray a base di Fosfolipidi, Acido Ialuronico, Vitamina A, Vitamina E ed estratti di Tè verde e Tè nero, indicato in caso di arrossamento, bruciore, prurito ed irritazione della zona palpebrale in generale, anche associati a secchezza oculare, blefariti ed altre patologie oculari dovute ad un danneggiamento dello strato lipidico della rima palpebrale. La sua composizione lenisce e ripara dallo stress ossidativo la zona palpebrale e peri oculare (contorno occhi) donando una sensazione di sollievo.

CARATTERISTICHE

La superficie dell'occhio è protetta da un film lacrimale costituito all'esterno da uno strato lipidico che riduce l'evaporazione delle lacrime dell'occhio. **Iridina® Spray** è un dispositivo medico che contribuisce a ripristinare la componente lipidica presente sulla rima palpebrale in caso di modificazioni funzionali o tissutali. Esso possiede un'attività protettiva e coadiuva i processi riparativi del tessuto palpebrale ripristinando il naturale equilibrio idrolipidico. L'azione di **Iridina® Spray** si manifesta attraverso il mantenimento della funzionalità della rima palpebrale e attraverso un miglioramento della idratazione e della elasticità del tessuto palpebrale. Il recupero dell'equilibrio idrolipidico consente di risolvere la sintomatologia di bruciore e prurito palpebrale causate ad esempio da vento e polvere, esposizione al sole, cloro, trucco, scarso riposo e di ridurre quindi il gonfiore e l'edema conseguenti ai continui sfregamenti della palpebra irritata.

I **Fosfolipidi** sono dei lipidi contenenti fosfati aventi una porzione idrofila ed una porzione idrofoba, i fosfolipidi sono dei costituenti fondamentali della struttura delle membrane cellulari.

I Fosfolipidi accompagnati da vitamina A e Vitamina E sono considerati un trattamento ottimale per ripristinare e stabilizzare la componente lipidica del film lacrimale pertanto i fosfolipidi contenuti in **Iridina® Spray** possono contribuire a ripristinare la componente lipidica dell'epidermide palpebrale e della rima palpebrale dando così giovamento all'intero sistema.

La **Vitamina E** è un potente antiossidante fondamentale per contrastare la formazione di radicali liberi, sostanze tossiche per tutti i tessuti dell'organismo, e previene la degradazione della **Vitamina A**.

L'Acido ialuronico ad alto peso molecolare, ottenuto per sintesi biotecnologica, è una sostanza che dà origine a soluzioni mucomimetiche con elevate proprietà lubrificanti e idratanti. L'uso combinato di Fosfolipidi contenenti Vitamina A e Vitamina E facilita anche l'effetto protettivo e riparativo che risulta utile in tutti i casi di arrossamento, gonfiore e prurito palpebrale.

Gli estratti di Tè verde e Tè nero (Camellia Sinensis) essendo ricchi in epigallo catechina (EGC), ed epi-gallo-catechina-gallato (EGCG), esercitano una azione anti ossidante proteggendo la zona palpebrale dalle sostanze ossidanti presenti nell'ambiente, riducendo il possibile danno determinato da quest'ultime, proteggendo pertanto la fisiologica integrità della parete palpebrale.



MODO D'USO

Agitare e togliere il cappuccio protettivo. Quando si utilizza lo spray per la prima volta, sono necessarie 3-4 pressioni per riempire l'erogatore. Spruzzare sulle palpebre chiuse da una distanza di 10-15 cm, erogando lo spruzzo da una posizione fronte-laterale. Applicare 1-2 spruzzi su ogni palpebra, almeno 2-3 volte al giorno, specialmente la sera. Può essere utilizzato in modo continuativo su base giornaliera. Il particolare nebulizzatore utilizzato impedisce la contaminazione esterna del prodotto. Dopo l'uso, rimettere il cappuccio protettivo. È sconsigliato utilizzare lo spray su occhi truccati con make-up no waterproof (resistente all'acqua). L'azione del dispositivo a livello palpebrale ne consente l'uso anche con lenti a contatto indossate.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

AVVERTENZE

NON SPRUZZARE NELL'OCCHIO APERTO. In caso di contatto diretto con l'occhio il prodotto può provocare un leggero senso di bruciore che si risolve spontaneamente; se persistente, lavare abbondantemente con acqua. Non utilizzare in caso di ipersensibilità accertata verso i componenti. Non utilizzare lo spray sugli occhi truccati con make-up no waterproof (resistente all'acqua). Il prodotto non è destinato all'uso pediatrico. Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini. Non è stata valutata l'interazione con altri prodotti oftalmici, consultare un medico prima dell'uso insieme ad altri prodotti oftalmici. Prodotto per uso esterno. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza. Non utilizzare in caso di confezione danneggiata. Consultare un medico se i sintomi persistono.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco al riparo da fonti di calore. Dopo la prima apertura avere cura di rimettere il cappuccio protettivo. Il flacone può essere usato fino a 6 mesi dopo l'apertura.

COMPOSIZIONE

Acqua, glycerin, sodium chloride, polysorbate 20, phenoxyethanol, alcohol denat., propanediol, disodium phosphate, caprylic/capric triglyceride, ethylhexylglycerin, sodium phosphate, lecithin, sodium dehydroacetate, sodium hyaluronate, phospholipids, glycyrrhetinic acid, tocopherol, retinyl palmitate, helianthus annuus (sunflower) seed oil, propylene glycol, camelia sinensis (green tea) leaf extract, camelia sinensis leaf extract, citric acid, sodium benzoate, potassium sorbate.

CONFEZIONE

Flacone da 10 ml (circa 100 dosi).





DISPOSITIVO MEDICO

Distributore:

Montefarmaco OTC SpA Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)



REF FT.CE.12B Rev. 1 del 09.2016 Art. 4 del 09.2019

