



AZIONE PALPEBRALE OCCHI SECCHI E STANCHI

INDICAZIONI

Iridina® Spray è un dispositivo medico in spray a base di Fosfolipidi, Acido Ialuronico, Vitamina A, Vitamina E ed estratto di Shiso, indicato **per le irritazioni della zona palpebrale in generale anche associati a secchezza oculare, blefariti ed altre patologie oculari comuni dovute ad un danneggiamento dello strato lipidico della rima palpebrale.** La sua composizione idrata e lubrifica la zona palpebrale e migliora l'elasticità della zona perioculare (contorno occhi) donando una sensazione di freschezza.

CARATTERISTICHE

La superficie dell'occhio è protetta da un film lacrimale costituito all'esterno da uno strato lipidico che riduce l'evaporazione delle lacrime dell'occhio. **Iridina® Spray** è un dispositivo medico che contribuisce a ripristinare la componente lipidica presente sulla rima palpebrale in caso di modificazioni funzionali o tissutali. Esso possiede un'attività protettiva e coadiuva i processi riparativi del tessuto palpebrale ripristinando il naturale equilibrio idrolipidico. L'azione di **Iridina® Spray**, grazie alla sua formulazione, si manifesta attraverso il mantenimento della funzionalità della rima palpebrale migliorando l'idratazione e l'elasticità del tessuto palpebrale, alleviando pertanto i sintomi dell'occhio secco e dell'affaticamento visivo causati ad esempio dall'uso prolungato del computer, uso di lenti a contatto, ambienti chiusi, fumosi o con aria condizionata, lo smog, l'età avanzata, i cambiamenti ormonali, la guida e lo scarso riposo.


I **Fosfolipidi** sono dei lipidi contenenti fosfati aventi una porzione idrofila ed una porzione idrofoba, i fosfolipidi sono dei costituenti fondamentali della struttura delle membrane cellulari.

I Fosfolipidi accompagnati da vitamina A e Vitamina E sono considerati un trattamento ottimale per ripristinare e stabilizzare la componente lipidica del film lacrimale pertanto i fosfolipidi contenuti in **Iridina® Spray** possono contribuire a ripristinare la componente lipidica dell'epidermide palpebrale e della rima palpebrale dando così giovamento all'intero sistema.

Le **Vitamine A ed E** per le loro proprietà lenitive ed emollienti contribuiscono al mantenimento dello stato ottimale del tessuto palpebrale e perioculare e, in sinergia con i Fosfolipidi, forniscono un supporto funzionale alla componente lipidica presente sulla rima palpebrale. La Vitamina E inoltre è un potente antiossidante fondamentale per contrastare la formazione di radicali liberi, sostanze tossiche per tutti i tessuti dell'organismo, e previene la degradazione della Vitamina A.

L'**Acido ialuronico ad alto peso molecolare**, ottenuto per sintesi biotecnologica, è una sostanza che dà origine a soluzioni mucomimetiche con elevate proprietà lubrificanti e idratanti.

L'**estratto di Shiso** contenuto in **Iridina® Spray** è utile per mantenere la fisiologica idratazione e elasticità della zona peri oculare (contorno occhi).

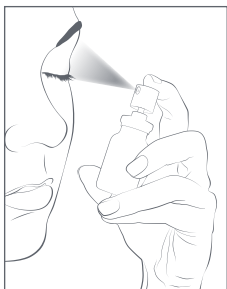

MODO D'USO

Agitare e togliere il cappuccio protettivo. Quando si utilizza lo spray per la prima volta, sono necessarie 3-4 pressioni per riempire l'erogatore. Spruzzare sulle palpebre chiuse da una distanza di 10-15 cm, erogando lo spruzzo da una posizione fronte-laterale. Applicare 1-2 spruzzi su ogni palpebra, almeno 2-3 volte al giorno, specialmente la sera. Può essere utilizzato in modo continuativo su base giornaliera. Il particolare nebulizzatore utilizzato impedisce la contaminazione esterna del prodotto. Dopo l'uso, rimettere il cappuccio protettivo. È sconsigliato utilizzare lo spray su occhi truccati con make-up no waterproof (resistente all'acqua). L'azione del dispositivo a livello palpebrale ne consente l'uso anche con lenti a contatto indossate.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

AVVERTENZE

NON SPRUZZARE NELL'OCCHIO APERTO. In caso di contatto diretto con l'occhio il prodotto può provocare un leggero senso di bruciore che si risolve spontaneamente; se persistente, lavare abbondantemente con acqua. Non utilizzare in caso di ipersensibilità accertata verso i componenti. Non utilizzare lo spray sugli occhi truccati con make-up no waterproof (resistente all'acqua). Il prodotto non è destinato all'uso pediatrico. **Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.** Non è stata valutata l'interazione con altri prodotti oftalmici, consultare un medico prima dell'uso insieme ad altri prodotti oftalmici. Prodotto per uso esterno. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza. Non utilizzare in caso di confezione danneggiata. Consultare un medico se i sintomi persistono.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco al riparo da fonti di calore. Dopo la prima apertura avere cura di rimettere il cappuccio protettivo. **Il flacone può essere usato fino a 6 mesi dopo l'apertura.**

COMPOSIZIONE

Acqua, glycerin, sodium chloride, polysorbate 20, phenoxyethanol, alcohol denat., propanediol, disodium phosphate, ethylhexylglycerin, caprylic/capric triglyceride, sodium phosphate, lecithin, sodium dehydroacetate, sodium hyaluronate, phospholipids, alcohol, glycyrrhetic acid, tocopherol, retinyl palmitate, helianthus annuus (sunflower) seed oil, perilla ocymoide leaf extract, sodium benzoate.

CONFEZIONE

Flacone da 10 ml (circa 100 dosi).



Alfakjn Srl
P.zza della Repubblica, 22
27026 Garlasco (PV)



**DISPOSITIVO
MEDICO**

Distributore:
Montefarmaco OTC SpA
Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)



03413191001

REF FT.CE.12A
Rev. 1 del 09.2016
Art. 4 del 09.2019

MONTEFARMACO