

# irilens<sup>®</sup> 0,4%

**AZIONE PROLUNGATA**

**GOCCE OCULARI  
IDRATANTI E LUBRIFICANTI**

*15 monodose sterili  
da 0,5 ml richiudibili*

**Irilens 0,4% gocce oculari** è una soluzione oftalmica sterile, priva di conservanti ad effetto idratante e lubrificante, contenente acido ialuronico sale sodico allo 0,4% di origine biotecnologica ad alto peso molecolare. L'acido ialuronico sale sodico è un mucopolisaccaride che, in caso di alterazioni del film lacrimale, ne ristabilisce l'equilibrio. La sua concentrazione allo 0,4% consente una maggiore idratazione con un'azione prolungata nel tempo. È quindi indicato in tutti i casi in cui si presentino disturbi causati da secchezza oculare.

**Può essere utilizzato anche da chi porta lenti a contatto.**


## DESTINAZIONE D'USO

**Irilens 0,4% gocce oculari** idratanti e lubrificanti è indicato in tutti i casi in cui si presentano disturbi causati da secchezza oculare. Le cause più comuni che determinano secchezza oculare possono essere:

- Uso di lenti a contatto
- Motivi ambientali: sole, vento, freddo, locali fumosi, locali con aria secca prodotta da impianti di riscaldamento o di condizionamento
- Uso di personal computer
- Età avanzata
- Terapie farmacologiche: antidepressivi, ansiolitici, ormoni e antistaminici
- Chirurgia oculare

## ISTRUZIONI PER L'USO

- Con le mani pulite aprire la busta di protezione, staccare un monodose e aprirlo ruotando ed estraendo il cappuccio.
- Instillare 1/2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il monodose.
- Il contenitore, dopo la prima apertura, può essere richiuso con l'apposito cappuccio e la soluzione rimasta all'interno del monodose potrà essere riutilizzata entro 12 ore.
- I portatori di lenti a contatto possono applicare 1-2 gocce di soluzione su ogni lente prima dell'inserimento, per mantenere l'occhio umido e lubrificato.
- Ripetere, se necessario, l'operazione 2-4 volte al giorno.
- Il prodotto è monopaziente.
- Conservare i monodose non utilizzati nella busta di protezione.

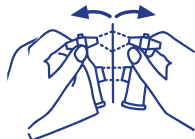

**Si separa**



**Si apre**



**Si usa**



**Si richiude**

## COMPOSIZIONE

Acido ialuronico sale sodico 0,4%, sodio fosfato monobasico monoidratato, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

## MISURE PRECAUZIONALI ED AVVERTENZE

Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.

- Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Lasciar trascorrere almeno 15 minuti dopo l'uso prima di istillare farmaci per uso oftalmico esterno.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- Conservare a temperatura non superiore a 30°C.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- Tenere il preparato fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.

In alcuni casi, dopo la somministrazione, si è osservato un breve offuscamento della vista dovuto alla densità della soluzione, che comunque scompare molto rapidamente.

## EFFETTI COLLATERALI

Ad oggi non sono stati segnalati effetti collaterali.

## CONFEZIONE

15 monodose sterili da 0,5 ml richiudibili.

## VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza indicata sull'astuccio e sul monodose.

 **Montefarmaco OTC SpA**  
Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)



**DISPOSITIVO  
MEDICO**

**STERILE A**

Ultima revisione: 0 del 02/2019

016751190201

 **MONTEFARMACO**