

iridil®

GOCCE OCULARI RINFRESCANTI E LENITIVE

Flacone da 10 ml

Iridil® gocce oculari è una soluzione sterile per uso oftalmico a pH fisiologico, a base di acque distillate di hamamelis, camomilla, euphrasia e malva, note per le loro proprietà rinfrescanti e lenitive. L'azione combinata di questi elementi naturali allevia l'arrossamento oculare e/o la sensazione di bruciore agli occhi dovute a cause ambientali quali vento, sole, fumo, inquinamento, ambienti condizionati e/o da affaticamento visivo dovuto a intenso impegno per lavoro e studio, eccessivo uso del computer ed esposizione alla luce.

La formulazione di **Iridil® gocce oculari** in flacone multidose contiene sodio clorito quale agente conservante, che svolge un'efficace azione antimicrobica all'interno del contenitore, bloccando la proliferazione batterica e garantendo una migliore tollerabilità del prodotto in quanto appartiene alla categoria dei "conservanti a scomparsa" che, una volta instillati nell'occhio, si decompongono. Infatti il sodio clorito, dopo l'applicazione, si converte in ossigeno, che evapora, e sodio cloruro, che entra a far parte della soluzione stessa e che non svolge alcuna azione. A differenza quindi di altri agenti conservanti, tale componente non permane nell'occhio come tale, evitando il manifestarsi di eventi avversi generalmente legati all'uso dei normali conservanti.

Può essere utilizzato anche con tutti i tipi di lenti a contatto indossate.

COMPOSIZIONE

Acqua distillata di camomilla, acqua distillata di hamamelis, acqua distillata di euphrasia, acqua distillata di malva, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio cloruro, disodio EDTA, sodio clorito, acqua purificata.

Non contiene benzalconio cloruro.

ISTRUZIONI PER L'USO

Aprire il flacone rimuovendo il tappo di protezione ruotandolo. Instillare 1-2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il flaconcino. Dopo l'uso, richiudere immediatamente il flacone: **il contenuto può essere riutilizzato entro 3 mesi dalla prima apertura**. Indicato anche per uso frequente, più volte al giorno se necessario, in base al bisogno o alle indicazioni del medico. I portatori di lenti a contatto possono applicare 1-2 gocce di soluzione su ogni lente prima dell'inserimento, per mantenere l'occhio umido e lubrificato.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è utilizzabile esclusivamente da un solo paziente.
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.

- Lasciar trascorrere almeno 10-15 minuti dopo l'uso prima di istillare farmaci per uso oftalmico esterno.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del contenitore.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di disturbi durante l'uso sospendere il trattamento e consultare un medico.

EFFETTI INDESIDERATI

Non sono noti effetti indesiderati.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare ad una temperatura inferiore a 30°.

Il contenuto del flacone può essere riutilizzato entro 3 mesi dalla prima apertura.

VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione e sul flacone.

DISPOSITIVO MEDICO



 **Montefarmaco OTC SpA**
Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)

Ultima revisione: 28/02/2020

02618200701
COD.25412 rev02.2020/07

 **MONTEFARMACO**