

# iridina®

## bagno oculare

con Acido ialuronico, Camomilla, Mirtillo

### PROPRIETÀ

**Iridina® Bagno Oculare** è una soluzione con elevate proprietà idratanti e lenitive. Contiene estratto di camomilla, ideale per alleviare stanchezza e affaticamento oculare; estratto di mirtillo utile per proteggere la mucosa oculare da agenti atmosferici e fattori ambientali; acido ialuronico, adatto a mantenere l'occhio sempre idratato. **La garanzia della sua elevata qualità microbiologica è ottenuta attraverso un processo di filtrazione sterilizzante.**

### INDICAZIONI

**Iridina® Bagno Oculare** è indicato per alleviare l'arrossamento, l'irritazione, l'affaticamento, il prurito e la secchezza oculare dovute a: condizionamento e riscaldamento dell'aria, soggiorno in presenza di fumo, o di altri tipi di inquinamento dell'aria, esposizione prolungata al vento o ai raggi solari, cloro, salsedine, attività sportive in genere, intenso impegno per lo studio o il lavoro, uso di lenti a contatto, traumi post-operatori, corpi estranei, uso eccessivo degli schermi video e stanchezza.

### ISTRUZIONI PER L'USO

- Lavare le mani prima di ogni applicazione, risciacquare l'occhiera con acqua calda.
- Riempire l'occhiera con il prodotto per un terzo e chiudere tempestivamente il prodotto.
- Piegarla leggermente la testa in avanti e premere con cautela l'occhiera sull'occhio.

- Alzare la testa tenendo l'occhio aperto, in modo che la soluzione bagni bene l'occhio così da rendere efficace il trattamento.
- Muovere la testa lentamente a destra e sinistra, come a dondolarsi per 30 secondi ed asciugare l'occhio con un batuffolo di cotone.
- Gettare via la soluzione rimanente nell'occhiera e ripetere la stessa procedura per l'altro occhio.

### CONTROINDICAZIONI

Non esiste alcuna controindicazione accertata, se non vi sono allergie specifiche per qualche componente.

### PRECAUZIONI

- Il prodotto è solo per uso esterno.
- Non applicare il prodotto mentre si portano le lenti a contatto.
- La soluzione, una volta aperta, deve essere utilizzata entro 90 giorni.
- Per i bambini al di sotto dei 3 anni utilizzare il prodotto solo su prescrizione medica.
- Non usare se il sigillo non è integro.
- Chiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Non Ingerire.
- È consigliata l'applicazione per non più di 2-3 giorni e non più di 3-4 volte al giorno
- Conservare il flacone lontano da fonti di calore e comunque al di sotto di 30°C.
- Non usare dopo la scadenza: 

## AVVERTENZE

- Non utilizzare in caso di ipersensibilità specifica verso qualche componente.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Quando siano prescritti medicinali per uso oftalmico, farsi consigliare dallo specialista sull'uso contemporaneo di **Iridina® Bagno Oculare**.
- Non disperdere il flaconcino nell'ambiente, dopo l'uso.

## COMPLICANZE

In caso di fastidio o di persistente irritazione, interrompere l'uso e consultare lo specialista.

## COMPOSIZIONE

PoliEsaMetilenBiguanide: 0.00023%; EDTA bisodico 0.01%; Matricaria Camomilla, Vaccinium Myrtillus, HPMC, Acido ialuronico, Tampone borato, eccipienti e Acqua depurata q.b. a 100%.



Seguire attentamente quanto riportato in etichetta e conservare il presente foglio illustrativo.

**Validità del prodotto: 3 anni, se in confezione integra e correttamente conservato.**



Esoform s.r.l.

Viale del lavoro, 10 - 45100 Rovigo - Italia

Distribuito da **MONTEFARMACO OTC SpA**  
Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)



	Dispositivo Medico
	Non disperdere nell'ambiente
	Il Punto Verde - Sistema di Smaltimento
	Prodotto in Asepsi
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Attenzione, consultare il foglietto illustrativo
	Valore Massimo di Temperatura
	Lotto
	Data di scadenza
	Data di produzione
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Tenere lontano da fonti di calore
	Quantità stimata

IriBOI250301  
20001F004 - REV.2021/01/04