

iridina®

gocce lubrificanti

Flacone da 10 ml

SENZA CONSERVANTI

**Idratazione a lunga durata
Protezione dalla luce blu**

Anche con lenti a contatto indossate

Iridina® Gocce Lubrificanti è una soluzione sterile per uso oftalmico con un pH fisiologico, a base di sodio ialuronato. La soluzione è confezionata in pratici contenitori polidose da 10 ml, **senza conservanti**. **Iridina® Gocce Lubrificanti** svolge un'azione **idratante e lubrificante** per la superficie oculare e dona un temporaneo sollievo al bruciore, all'irritazione ed ai disagi correlati alla secchezza oculare. Inoltre, **protegge gli occhi dai danni causati dalla luce blu emessa da dispositivi digitali** quali PC, tablet, smartphone e schermi televisivi. La concentrazione di sodio ialuronato allo 0,4% consente una maggiore idratazione con un'azione prolungata nel tempo. Il sodio ialuronato conferisce al dispositivo medico proprietà mucomimetiche e visco-elastiche in modo da garantire un'adeguata lubrificazione della superficie oculare, proteggendola dall'attrito generato dai movimenti oculari. Inoltre, il polimero è in grado di trattenere l'acqua: per questo motivo la soluzione è in grado di mantenere umidificata la superficie oculare e aumentare la stabilità del film lacrimale, proteggendo la mucosa oculare dagli agenti esterni. La soluzione contiene acido bórico e sodio tetraborato decaidrato, come sistema tampone, e sodio cloruro così da garantire una soluzione fisiologica tollerabile per l'occhio. È idoneo per l'utilizzo con lenti a contatto morbide o rigide indossate, senza necessità di rimuoverle. Il dispositivo medico può essere utilizzato dai bambini a seguito di consulto medico. Dotato di un innovativo sistema multi-dose senza conservanti (OSD - Ophthalmic Squeeze Dispenser), **Iridina® Gocce Lubrificanti** unisce i benefici di una soluzione monodose, senza conservanti, alla praticità di un flacone multidose.

INDICAZIONI D'USO

Iridina® Gocce Lubrificanti idrata e lubrifica l'occhio ed è indicato per rinfrescare e dare sollievo alla mucosa irritata o nel caso vi siano disturbi da occhio secco. Le cause più comuni che determinano secchezza oculare e irritazione possono essere:


- uso di lenti a contatto per molte ore consecutive;
- motivi ambientali (aria condizionata, eccessiva esposizione alla radiazione solare, vento, fumo, inquinamento);
- occhio secco causato da eccessive ore di studio, da troppo ore di lavoro al pc, dalla sindrome dell'occhio secco;
- eccessiva esposizione alla luce blu derivante da dispositivi digitali quali PC, tablet, smartphone e schermi televisivi;
- stress conseguente interventi di chirurgia oculare.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il dispositivo medico è indicato anche per portatori di lenti a contatto.

Il dispositivo può essere utilizzato dai bambini a seguito di consulto medico.

- Prima della prima somministrazione rimuovere il tamper-evident e rimuovere il tappo di protezione.
- In ragione delle caratteristiche intrinseche del flacone con erogatore per soluzioni senza conservanti, al progressivo svuotamento del flacone potrebbe essere necessario esercitare una pressione maggiore per consentire la fuoriuscita del prodotto.
- Instillare 1-2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il flacone.
- Dopo l'uso, richiudere immediatamente il flacone: **il contenuto può essere riutilizzato entro 6 mesi dalla prima apertura.**
- Indicato anche per uso frequente, più volte al giorno, in base al bisogno o alle indicazioni del medico. La visione può essere temporaneamente offuscata dopo la somministrazione del prodotto. Se l'effetto persiste o peggiora consultare il medico.

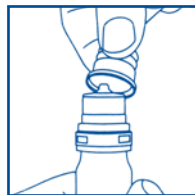

COMPOSIZIONE

Sodio ialuronato 0,4%, acido bórico, sodio tetraborato decaidrato, sodio cloruro, acqua ppi.

Non contiene conservanti.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
- Il prodotto è monopaziente.
- Non utilizzare il prodotto se il confezionamento risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
- Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità del flacone.
- Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
- In caso di effetti indesiderati, interrompere il trattamento e consultare un medico.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

EFFETTI INDESIDERATI

Ad oggi non è noto alcun effetto indesiderato.

CONFEZIONAMENTO

Flacone da 10 ml, senza conservanti.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura inferiore a 30°C

Il contenuto del polidose può essere riutilizzato entro 6 mesi dalla prima apertura.

VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza riportata sulla confezione.



Montefarmaco OTC SpA

Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)



**DISPOSITIVO
MEDICO**

STERILE A

Ultima revisione: 1 del 01/2021

02971210101