

irilens® 0,4%

AZIONE PROLUNGATA**GOCCE OCULARI
IDRATANTI E LUBRIFICANTI**10 monodose sterili
da 0,5 ml richiudibili

Irilens 0,4% gocce oculari è una soluzione oftalmica sterile, priva di conservanti, ad **effetto idratante e lubrificante**, contenente acido ialuronico sale sodico allo 0,4% di origine biotecnologica ad alto peso molecolare. L'acido ialuronico sale sodico è un mucopolisaccaride che, in caso di alterazioni del film lacrimale, ne ristabilisce l'equilibrio. La sua concentrazione allo 0,4% consente una **maggiore idratazione con un'azione prolungata nel tempo**. È quindi indicato in tutti i casi in cui si presentino disturbi causati da secchezza oculare.

Idoneo per l'utilizzo con lenti a contatto morbide o rigide indossate.


DESTINAZIONE D'USO

Irilens 0,4% gocce oculari è una soluzione oftalmica lubrificante e idratante indicata in tutti i casi in cui si presentano disturbi causati da secchezza oculare. Le cause più comuni che determinano secchezza oculare possono essere:

- uso di lenti a contatto;
- motivi ambientali: sole, vento, freddo, locali fumosi, locali con aria secca prodotta da impianti di riscaldamento o da condizionamento;
- uso di personal computer;
- età avanzata;
- terapie farmacologiche: antidepressivi, ansiolitici, ormoni e antistaminici;
- chirurgia oculare.

ISTRUZIONI D'USO

- Con le mani pulite aprire la busta di protezione, staccare un monodose e aprirlo ruotando ed estraendo il cappuccio.
- Instillare 1-2 gocce in ciascun occhio premendo leggermente il monodose.
- Il contenitore, dopo la prima apertura, deve essere richiuso con l'apposito cappuccio e la soluzione rimasta all'interno del monodose potrà essere riutilizzata entro 12 ore.
- I portatori di lenti a contatto possono applicare 1-2 gocce di soluzione su ogni lente prima dell'inserimento, per mantenere l'occhio umido e lubrificato.
- Ripetere, se necessario, l'operazione 2-4 volte al giorno.
- Il prodotto è monopaziente.
- Conservare i monodose non utilizzati nella busta di protezione.

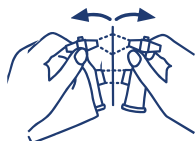

Si separa



Si apre



Si usa



Si richiude

COMPOSIZIONE

Acido ialuronico sale sodico 0,4%, sodio fosfato monobasico monoidratato, sodio fosfato bibasico dodecaidrato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

MISURE PRECAUZIONALI ED AVVERTENZE

- Il prodotto è solo per uso oftalmico esterno.
 - Non utilizzare il prodotto se il confezionamento risultasse, al momento della prima apertura, danneggiato o non perfettamente chiuso.
 - Lasciar trascorrere almeno 15 minuti dopo l'uso prima di istillare farmaci per uso oftalmico esterno.
 - Durante l'applicazione non toccare l'occhio né alcuna altra superficie con l'estremità di erogazione del monodose.
 - Non usare in caso di nota incompatibilità verso qualsiasi componente della preparazione.
 - Conservare a temperatura non superiore a 30°C.
 - Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
 - Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.
 - Tenere il preparato fuori dalla portata dei bambini.
- In alcuni casi, dopo la somministrazione, si è osservato un breve offuscamento della vista dovuto alla densità della soluzione, che comunque scompare molto rapidamente.

EFFETTI COLLATERALI

Ad oggi non sono stati segnalati effetti collaterali.

CONFEZIONE

10 monodose sterile da 0,5 ml richiudibili.

VALIDITÀ

A confezionamento integro non superare la data di scadenza indicata sull'astuccio e sul monodose.

 **Montefarmaco OTC SpA**
Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)



**DISPOSITIVO
MEDICO**



Ultima revisione: 1 del 07/2024

054991240701

 **MONTEFARMACO**