

irilenti[®] PLUS

SOLUZIONE UNICA CON IALURONATO DI SODIO E ALLANTOINA

Irilenti[®] Plus è una Soluzione Unica con Ialuronato di Sodio per la disinfezione, la conservazione, la detersione, il risciacquo, l'idratazione di tutte le lenti a contatto morbide. Rimuove le proteine, speciale per occhi sensibili. Attiva in 5-7 minuti. **NUOVA** con Allantoina.

PROPRIETÀ

Irilenti[®] Plus ha un'azione altamente disinfettante, conservante, umettante e detergente.

NUOVA! Con Allantoina, in sinergia con l'Acido Ialuronico fornisce idratazione alla cornea e compensa le irritazioni.

Irilenti[®] Plus idrata le lenti sia appena applicate che durante l'indosso giornaliero con conseguente comfort duraturo e riduzione di secchezza ed irritazione.

Il pH e l'osmolarità sono tali da essere adeguatamente biocompatibili con i tessuti e con i liquidi organici oculari.

INDICAZIONI

È indicata per la conservazione, la disinfezione, il risciacquo, la detersione, l'idratazione, la rimozione giornaliera dei depositi muco-proteici di tutti i tipi di lenti a contatto morbide.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Lavare le mani e asciugarle accuratamente con un panno pulito.
- Per evitare confusione, iniziare il trattamento sempre con la stessa lente.
- Rimuovere la lente dall'occhio e porla sul palmo della mano aggiungendo una quantità di **Irilenti[®] Plus**

sufficiente a bagnare completamente la lente..

- Strofinare delicatamente con un movimento "in avanti e indietro", entrambe le superfici della lente per almeno 10-15 secondi, utilizzando il dito dell'altra mano.
- Risciacquare accuratamente e abbondantemente la lente con **Irilenti[®] Plus** in modo da rimuovere ogni traccia di depositi.
- Porre la lente nell'apposito contenitore.
- Ripetere per l'altra lente.
- Riempire il contenitore con **Irilenti[®] Plus** sino alla linea di dosaggio.
- Chiudere accuratamente il contenitore e lasciare immerse le lenti per almeno 2-3 ore o per tutta la notte.

CONTROINDICAZIONI

Non esistono controindicazioni accertate, se non in caso di allergia o ipersensibilità specifica per qualche componente.

PRECAUZIONI

- **Irilenti[®] Plus**, una volta aperta, deve essere utilizzata entro tre mesi. L'eventuale residuo deve essere eliminato.
- Non usare se il sigillo non è integro
- Per evitare qualsiasi contaminazione, non mettere mai a contatto il contagocce con alcuna superficie.
- Chiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Conservare il flacone lontano da fonti di calore e comunque al di sotto di 30°C.
- Non usare dopo la scadenza: 

AVVERTENZE

- Per lenti rimaste per più di 3-4 settimane nella soluzione **Irilenti® Plus** prima dell'uso: eliminare la soluzione dal contenitore e procedere alla disinfezione.
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità specifica verso qualche componente.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare sempre soluzione fresca, eliminando quella rimasta nel contenitore portalenti.
- Consultare il Professionista prima di usare qualsiasi medicinale oftalmico mentre si portano le lenti a contatto.
- Non utilizzare mai acqua del rubinetto per le lenti a contatto morbide.

COMPLICANZE

In caso di fastidio o di persistente irritazione, interrompere l'uso e consultare lo specialista.

COMPOSIZIONE

PoliEsaMetilenBiguanide 0.0001%, EDTA bisodico 0.1%, Sodio ialuronato 0.025%, Allantoina 0.1% Eccipienti e Acqua depurata q.b. a 100%.



Seguire attentamente quanto riportato in etichetta e conservare il presente foglio illustrativo.

Validità del prodotto: 3 anni, se in confezione integra e correttamente conservato.



Esoform s.r.l.

Viale del lavoro, 10 - 45100 Rovigo - Italia

Distribuito da **MONTEFARMACO OTC** SpA
Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)



	Dispositivo Medico
	Non disperdere nell'ambiente
	Il Punto Verde - Sistema di Smaltimento
	Prodotto in Asepsi
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Attenzione, consultare il foglietto illustrativo
	Valore Massimo di Temperatura
	Lotto
	Data di scadenza
	Data di produzione
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Tenere lontano da fonti di calore
	Quantità stimata